

# Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen

Zur Befeuchtung der Augenoberfläche bei trockenen und gereizten Augen

Natriumhyaluronat 1 mg/ml, steril, ohne Konservierungsmittel

## Inhaltsstoffe:

Natriumhyaluronat 1 mg/ml, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphate, Chloride (Kalium, Calcium, Magnesium), Natriumhydrogencarbonat, Aqua purificata

## Anwendungsgebiete:

Zur Befeuchtung der Augenoberfläche bei Benetzungsstörungen (wie z.B. trockene, gereizte oder brennende Augen) und zur Linderung und Behandlung von Reizungen durch äußere Einflüsse wie z.B. trockene bzw. klimatisierte Umgebung, Rauch, Staub, Pollen. Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen können auch mit formstabilen oder weichen Kontaktlinsen angewendet werden.

## Gegenanzeigen:

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen sollten bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden.





## Hinweise:

- Beachten Sie bitte, dass unmittelbar nach dem Eintropfen Ihre Sehfähigkeit kurzfristig verändert sein kann
- Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist
- Verwenden Sie Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen nicht gleichzeitig mit anderen Präparaten zur Anwendung am Auge an, weil dadurch gegebenenfalls die Wirkung der Präparate verändert wird. Im Falle dass andere Augentropfen/-salben angewendet werden, sollte grundsätzlich ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten zwischen den Anwendungen der verschiedenen Produkte eingehalten werden
- Bitte vermeiden Sie unbedingt das Berühren der Augenoberfläche oder anderen Gegenständen mit der Tropferspitze, um eine äußere Verkeimung zu vermeiden

## Anwendungstipps:

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen auf die Augenoberfläche tropfen oder in den Bindehautsack einbringen.

- Es wird empfohlen die Anwendung mit zuvor sorgfältig gereinigten Händen durchzuführen
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Originalitätsverschluss (siehe Abb. 1)
- Entfernen Sie vor jedem Gebrauch die Verschlusskappe (siehe Abb. 2)
- Legen Sie den Kopf etwas zurück (siehe Abb. 3)
- Halten Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten (senkrecht) über das jeweilige Auge (siehe Abb. 3)
- Öffnen Sie vorsichtig das Auge mit Daumen und Zeigefinger der freien Hand oder ziehen Sie das Unterlid leicht nach unten (siehe Abb. 3)
- Durch leichtes Drücken auf die Flasche wird 1 Tropfen auf die Augenoberfläche oder in den Bindehautsack eingebracht (siehe Abb. 3)
- Wiederholen Sie die Anwendung am anderen Auge
- Die Verschlusskappe nach jedem Gebrauch sofort wieder vorsichtig aufsetzen (siehe Abb. 4)

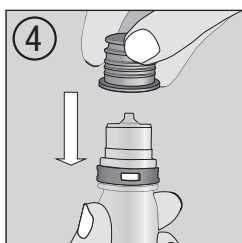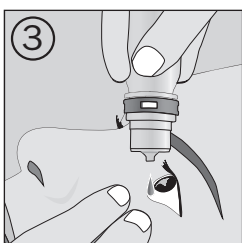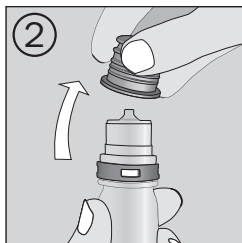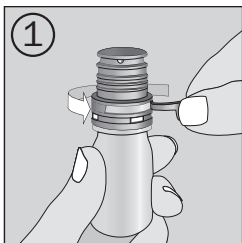

**Dosierung:**

Hyaluron-ratiopharm® Augentropfen können nach Bedarf angewendet werden.  
Im Allgemeinen empfiehlt sich eine Anwendung bis zu 4-mal täglich.

**Nebenwirkungen:**

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Das Präparat sollte dann nicht weiter angewendet werden.

**Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung:**

Kühl und trocken lagern, Lagertemperatur 2°C – 25°C

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Anbruch 12 Wochen verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

**Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:**

10 ml Augentropfen

2 x 10 ml Augentropfen

Stand der Information: November 2014



Optima Medical Swiss AG  
Bundesstrasse 7  
6300 Zug  
Schweiz

Vertrieb:  
ratiopharm GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

Medizinprodukt

Versionscode Z02